


ThevoSoft

DE	Bedienerhandbuch – ThevoSoft	3
----	------------------------------------	---

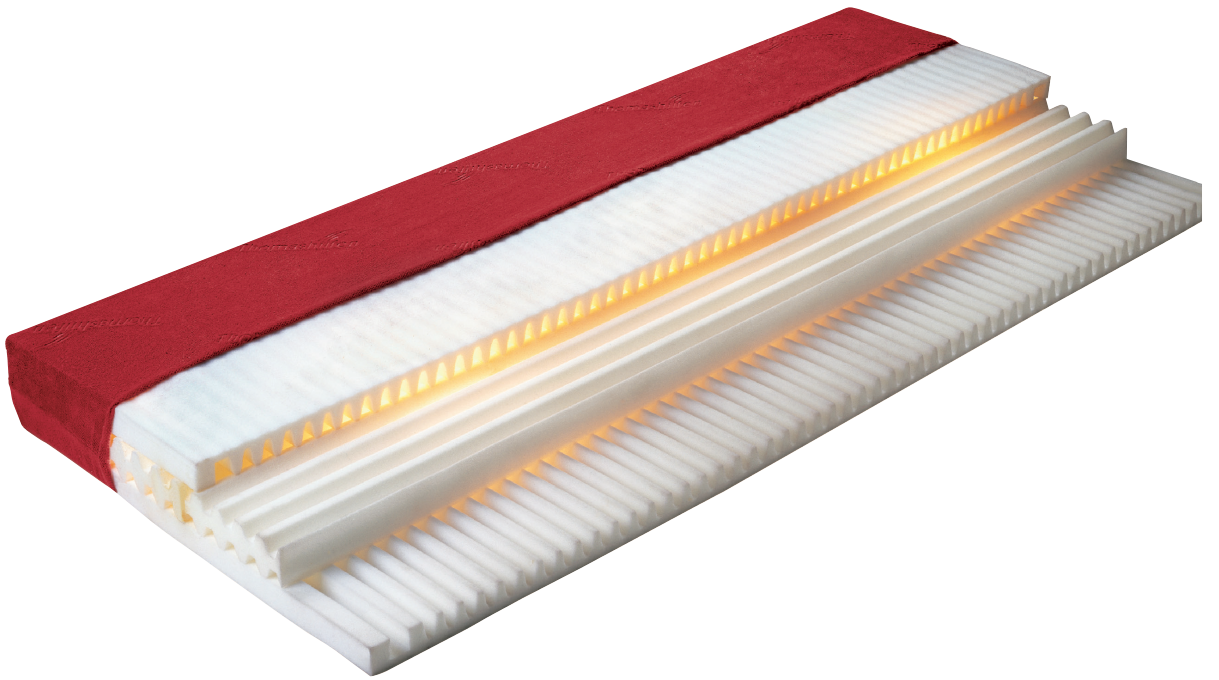

Sehr geehrte Nutzer,

Sie haben mit ThevoSoft eine Anti-Dekubitus-Matratze erworben, die höchsten Qualitätsansprüchen aus ambulanter und stationärer Pflege gerecht wird. Für ThevoSoft werden modernste Werkstoffe verwendet, die eine lange Lebensdauer garantieren. Bevor Sie ThevoSoft in Gebrauch nehmen, sollten Sie dieses Bedienerhandbuch unbedingt sorgfältig durchlesen. Es gibt Ihnen viele hilfreiche Informationen und Hinweise.

Sollten Sie trotzdem noch Fragen, Probleme oder Anregungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Fachhandel oder direkt an uns.

Wir möchten Sie in diesem Zusammenhang auch auf unsere Internet-Site www.thomashilfen.de aufmerksam machen, auf der Sie aktuelle Informationen abrufen können.

Unsere Adresse: Thomashilfen für Behinderte
 GmbH & Co. Medico KG
 Walkmühlenstraße 1
 D - 27432 Bremervörde
 Tel.: 0 47 61 / 88 60
 www.thomashilfen.de

Inhalt

Seite

Dekubitusprophylaxe und -therapie	4
Technische Daten	4
Lieferumfang.....	4
Anwendung.....	4
Desinfektionsmethoden und Reinigungsempfehlungen	4
Anwendungsrisiken und Kontraindikationen	5
Garantiebedingungen.....	5

Dekubitusprophylaxe und -therapie

ThevoSoft wurde zur Dekubitusprophylaxe und -therapie **bis einschließlich Stadium I nach EPUAP** (European Pressure Ulcer Advisory Panel) entwickelt.

Technische Daten

Außenmaße ThevoSoft	90 x 200 cm	100 x 200 cm	Höhe
bis 50 kg mit Jerseybezug	13 kg	14,4 kg	16 cm
bis 50 kg mit Inkontinenzbezug	12 kg	13,3 kg	
50 bis 100 kg mit Jerseybezug	14,8 kg	16,4 kg	16 cm
50 bis 100 kg mit Inkontinenzbezug	13,8 kg	15,3 kg	
100 bis 135 kg mit Jerseybezug	14,2 kg	15,8 kg	16 cm
100 bis 135 kg mit Inkontinenzbezug	13,2 kg	14,7 kg	

Weitere Maße auf Anfrage.

Lieferumfang

- Matratze mit Jersey- oder Inkontinenzbezug
- Bedienerhandbuch

Anwendung

Legen Sie die Matratze auf den vorhandenen Lattenrost oder Einlegerahmen des Bettes. ThevoSoft ist in jedem Pflege- oder Klinikbett einsetzbar.

Hinweis: Bei Betten mit Seitengittern müssen gegebenenfalls Seitengittererhöhungen genutzt werden.

Desinfektionsmethoden und Reinigungsempfehlungen

Matratze

Die Bezüge sind durch einen eingnähten Reißverschluss leicht abzunehmen und können gewaschen werden. Sie sind trocknerfest.

Jerseybezug

- waschbar bei 65 °C • trocknerfest

Inkontinenzbezug

- waschbar bei 65 °C • trocknerfest • per Wischdesinfektion zu reinigen

Desinfektion

Zur Desinfektion empfehlen wir zwei vom Robert-Koch-Institut anerkannte Verfahren:

- das fraktionierte Vakuumverfahren (VDV-Verfahren) bis zu einer max. Temperatur von 110 °C.
- das Dampfströmungsverfahren bis zu einer Temperatur von 110 °C.

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Anti-Dekubitus-Matratze über Thomashilfen reinigen und desinfizieren zu lassen: Unter der **Service-Hotline 0800 DEKUCLEAN (0800 - 335825326)** können Sie entsprechende Aufträge an Thomashilfen weiterleiten. Weitere Informationen zu diesem Service finden Sie im Internet unter: **www.dekuclean.de**

Wichtiger Hinweis: ThevoSoft ist autoklavierbar und kann für den Wiedereinsatz genutzt werden. Nach jedem Patientenwechsel sollte die Matratze mit einem auf o.g. Verfahren gereinigt und desinfiziert werden. Eine Wartung durch den Hersteller ist nicht notwendig. Für eine besondere Langlebigkeit der Matratze empfehlen wir diese hin und wieder zu wenden.

Anwendungsrisiken und Kontraindikationen

Bezüglich der Anwendung von ThevoSoft bedarf es keiner speziellen Einweisung.

Wichtiger Hinweis: Es muss bei der Versorgung darauf geachtet werden, dass die Matratze nach dem entsprechenden Körpergewicht des Patienten ausgewählt wird.

- ThevoSoft 50 bis max. 50 kg Patientengewicht
- ThevoSoft 100 von 50 bis max. 100 kg Patientengewicht
- ThevoSoft 135 von 100 bis max. 135 kg Patientengewicht

Bei stark ausgeprägter ungleicher Verteilung des Körpergewichtes (z. B. starkes Becken oder starker Bauch, Beinamputationen) sollte eine höhere Matratzenversorgung erfolgen.

Aus dem bisherigen praktischen Einsatz des Produktes und aus den umfangreich durchgeführten Tests sind uns keinerlei Probleme im Umgang mit dem Produkt bekannt geworden.

Bei sachgerechtem Gebrauch können Risiken bei der Anwendung ausgeschlossen werden. Kontraindikationen sind nicht bekannt.

Garantiebedingungen

Die Firma Thomashilfen verbürgt sich für die Qualität des gelieferten Produkts. Bei der Wahl des Materials sowie der Verarbeitung wurden höchste Produktionsstandards zugrundegelegt. Alle Matratzen wurden einer gründlichen Endkontrolle unterzogen. Thomashilfen bietet Ihnen eine Garantie von 24 Monaten. Bitte bewahren Sie deshalb alle im Zusammenhang mit ThevoSoft ausgehändigten Belege sorgfältig auf. Die Garantie umfasst alle Ansprüche aufgrund von Arbeits- und Materialfehlern, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung sowie natürlichen Verschleiß entstehen.

Information

Der BVMed (Bundesverband Medizintechnologie e.V.) hat einen Versorgungsleitfaden über die Auswahl von Hilfsmitteln gegen Dekubitus erstellt. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.bvmed.de

Pflegewissenschaftliche Beratung durch

IGAP

Institut für Innovationen im Gesundheitswesen
und angewandte Pflegeforschung e.V.



Wirkung belegt und überprüft



Thevo by
Thomashilfen

Walkmühlenstraße 1 · D - 27432 Bremervörde
Phone 047 61 / 88 677 · Fax: 047 61 / 88 619
E-mail: info@thomashilfen.com · www.thevo.info